

DentaPass[®]

Urgency

KIT D'URGENCE DENTAIRE



Notice d'utilisation du kit

www.dentapass.com

Introduction

DentaPass vous remercie d'avoir choisi son kit d'urgence dentaire.

* **DentaPass** est un kit d'urgence dentaire, qui a pour objectif de dépanner à **“court terme”** en attendant un rendez-vous chez votre dentiste.

* **En vacances, en week-end, à l'étranger, en randonnée...** vos loisirs peuvent être facilement gâchés par un problème dentaire imprévu...

Vous connaissez le problème, cela n'arrive jamais au bon endroit, ni au bon moment...

* Ce kit vous permettra de **replacer une couronne ou un bridge “décollé”, un amalgame ou un composite “perdu”, de combler une cassure de dent, recoller une dent provisoire...**

* **Il est essentiel de rappeler que ce kit est conçu pour procurer un soulagement à court terme sans dépasser 30 jours.** Sans l'avis d'un professionnel, l'état de vos dents risque de se détériorer. **Il ne faut pas attendre plus de 30 jours** après avoir réalisé vos propres soins d'urgence, sans consulter un dentiste.



Grâce à mon expérience en cabinet dentaire, j'ai eu l'idée de créer ce Kit pour répondre à vos problèmes en cas d'urgence dentaire. Ce Kit est innovant, accessible à tous et facile d'emploi.

Avec DentaPass Urgency, suivez pas à pas les instructions qui vous amèneront tout en douceur vers un soulagement et un mieux être.



Cyril Berrebi
Chirurgien dentiste

Composition du kit **DentaPass Urgency**

- une poudre dentaire (1 flacon de 5 g) **A**
Composition : oxyde de zinc et acétate de zinc
- un liquide dentaire (1 flacon de 5 ml) **B**
Composition : eugénol
- une pâte dentaire (1 flacon de 5 g) **C**
Composition : sulfate de calcium
- une paire de gants en latex (2 pièces) **D**
Non stériles 
- des doigts en latex (6 pièces) **E**
Non stériles 
- des compresses de gaze (2x3 pièces) **F**
Non stériles
- des rouleaux de coton salivaires (2x3 pièces) **G**
Non stériles
- un bloc papier pour mélanger (5 feuilles) **H**
- une cuillère doseuse **I**
- un instrument double : spatule/miroir **J**
- un instrument double : sonde/fouloir **K**



PREMIER GESTE (Si les conditions le permettent)

- Se brosser les dents.
- Se rincer avec un bain de bouche.
- Se laver soigneusement les mains avant utilisation du kit.

A SAVOIR



BRIDGE



COURONNE



DENT AVEC AMALGAMME

Consignes d'entretien et de réutilisation des instruments

- **Immédiatement après utilisation**, à l'aide d'un tissu ou d'un mouchoir sec, bien nettoyer la spatule et la sonde.
- **Après utilisation** des cotons, compresses, doigts et gants : ne pas réutiliser et jeter à la poubelle.
- **Après utilisation** d'une feuille de papier, ne pas réutiliser et jeter à la poubelle.

CE QUI PEUT VOUS ARRIVER :

Soins avec le kit DentaPass

- 1 Perte d'une couronne ou d'un bridge
- 2 Perte d'un pansement, amalgame ou composite
- 3 Fracture d'une dent
- 4 Tassement alimentaire
- 5 Saignement ou hémorragie buccale






Conseils seulement

- 6 Expulsion ou fracture d'une dent naturelle
- 7 Infection dentaire



Signification des logos

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| | Attention | | Limite supérieure de température |
| | Consulter le manuel | | Utiliser jusqu'au |
| | Contient du latex | | Non stérile |
| | Ne pas utiliser si emballage endommagé | | |

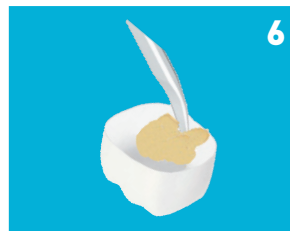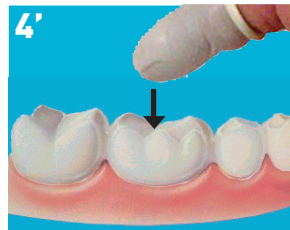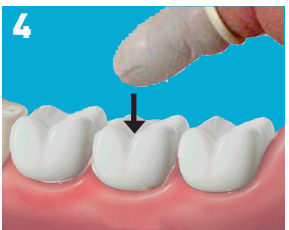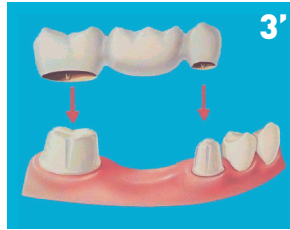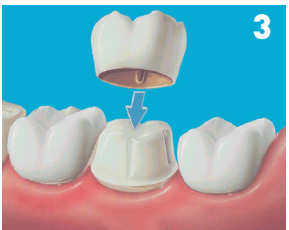

Attention, ne pas appliquer au contact des yeux.
Pour une bonne utilisation, se référer à la notice, bien respecter les consignes, si non, l'état de vos dents risque de se dégrader.

1. Perte d'une couronne ou d'un bridge :

Signes cliniques : vous avez perdu une couronne ou un bridge.

Matériel à utiliser : spatule **J**, bloc papier **H**, cuillère doseuse **I**, poudre **A** et liquide **B**, gants **D**, sonde **K**.



Application :

- A l'aide de la sonde, essayez de vider la partie intérieure de la couronne ou du bridge (*fig. 1*).
- Rincer abondamment la couronne ou le bridge à l'eau (*fig. 2*), puis séchez-le.
- Mettez-vous face à une glace, à l'aide du miroir dentaire écarter la joue pour avoir une meilleure visibilité, essayez de replacer la couronne ou le bridge, **sans colle dans un premier temps** afin de s'assurer de sa bonne position en bouche (lorsque vous fermez la bouche vous devez retrouver la position initiale) (*fig. 3 et 3'*).
- Répéter cette opération une deuxième fois.
- **Attention, ne pas forcer en serrant les dents mais plutôt en exerçant une pression avec votre index** (*fig. 4 couronne et 4' bridge*).
- Pour une couronne : déposer sur le bloc papier deux cuillères doseuses à ras de poudre **A** et 4 gouttes de liquide **B** et mélanger avec la spatule (*fig. 5*).
- Pour un bridge : multiplier le nombre de doses par le nombre de couronnes à remplir (exemple : *fig. 3'* pour 2 couronnes : il faut 8 gouttes et 4 cuillères à ras).
- Appliquer le mélange obtenu à l'intérieur du bridge ou de la couronne (*fig. 6*).
- Replacer l'ensemble en bouche (*fig. 3 et 3'*).
- Serrer les dents de façon à constater que tout soit bien en place.
- Si non, retirer-le et recommencer.
- Vous avez 10 minutes pour le temps de prise du ciment.
- Ne pas oublier de retirer les excès de ciment autour de la couronne ou du bridge à l'aide de la sonde.
- Eviter toute mastication pendant une heure.
- **En cas d'échec**, recommencer l'opération décrite ci-avant en mettant une goutte **B** en moins au mélange.





Ne pas appliquer l'eugénoL en cas : d'ulcération, de plaie ouverte ou de gonflement de la zone concernée.
Dans ce cas consultez votre dentiste.
Ne pas appliquer au contact des yeux.
Ne pas laisser un coton imbibé en bouche.
Evitez les contacts prolongés des zones environnantes : joue, langue, avec un coton mouillé.
Ne pas utiliser chez l'enfant.

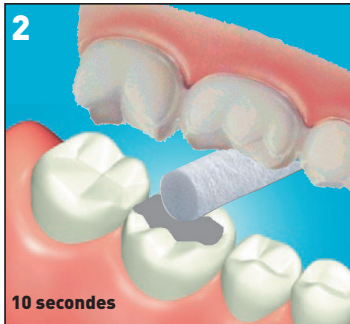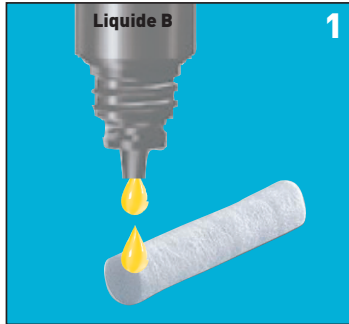

2. Perte d'un pansement, amalgame ou composite :

Signes cliniques : quand vous passez la langue, vous sentez un trou.

Matériel à utiliser : doigtier latex **E**, pâte **C**, spatule **J**, rouleau de coton **G** et le liquide **B**.

Application :

- Mettre 5 gouttes de liquide **B** (eugénol) sur un rouleau de coton (*fig. 1*).
- Mordre avec le coton imbibé en regard de la zone à obturer pendant 10 secondes (*fig. 2*). L'eugénol permet à la pâte d'adhérer à l'émail.
- Placer le doigtier sur votre index.
- À l'aide de la spatule, prenez **un peu de pâte C** (selon la taille de la cavité).
- Appliquer "la boulette" dans la cavité de la dent (*fig. 3*).
- Serrer les dents afin d'écraser la pâte.
- La pâte durcit toute seule au contact de la salive et à la chaleur de votre bouche (en 15 minutes). Laissez durcir.
- Ne pas mastiquer pendant une heure.
- **En cas d'échec :** recommencer la manipulation sans application du liquide **B**, bien sécher et mettre moins de pâte.



Ne pas appliquer au contact des yeux.



3. Fracture d'une dent :

Signes cliniques : quand vous passez la langue, ça coupe ou ça blesse.


Matériel à utiliser : doigtier latex **E**, pâte **C** et spatule **J**.

Application :

- Placer le doigtier sur votre index.
- À l'aide de la spatule, prendre **un peu de pâte C** (selon la taille de la cassure).
- Appliquer la **pâte C** sur la zone coupante.
- Avec votre doigt revêtu du doigtier en latex, aplanir la pâte sur le côté et au-dessus de la dent cassée pour obtenir une paroi lisse.
- Laisser durcir.
- Eviter toute mastication pendant une heure.



**Ne pas utiliser en cas d'ulcération ou d'infection de la zone concernée.
Tenir hors de portée et de la vue des enfants.**

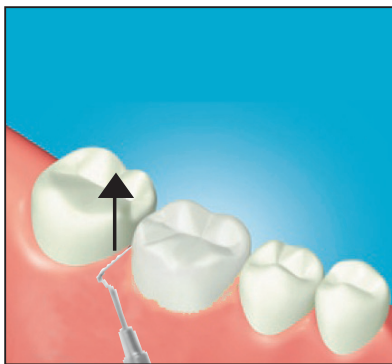

4. Tassement alimentaire :

Signes cliniques :

- Vous avez mal entre 2 dents, la gencive est gonflée et douloureuse.
- Vous ressentez que quelque chose reste coincé entre les dents.

Matériel à utiliser : Sonde K.

Application :

- Retirer “le tassement” par l’intérieur de la bouche en faisant un mouvement allant de la base de la dent vers le haut.
- Attention de ne pas trop forcer et de ne pas se blesser la gencive.
- Il est préférable de s’y reprendre à plusieurs fois délicatement que d’essayer de retirer le tassement alimentaire en une seule fois.

4



**En cas de saignement prolongé,
contacter immédiatement un professionnel de santé.
Une fois le saignement passé, ne pas laisser la compresse en bouche.**



5. Saignement ou hémorragie buccale :

Signes cliniques : saignement.

Matériel à utiliser : compresses de gaze **F**, gants en latex **D**.

Applications :

- Enfiler les gants.
- Plier une compresse de gaze en 2.
- Appliquer la compresse en regard de la zone blessée, en serrant les dents.
- Changer la compresse toutes les 10 minutes.
- Ne pas utiliser de bain de bouche, car il ralentirait la coagulation.
- En cas de saignement prolongé, consulter un professionnel de santé.



Il est fortement déconseillé de tenter d'utiliser un instrument du kit DentPass pour ausculter l'intérieur de votre bouche en cas d'infection dentaire, d'ulcération ou de plaies. Si non, votre état dentaire risque de s'aggraver.



6. Expulsion ou fracture d'une dent naturelle :

Le kit DentPass ne vous permet pas de régler provisoirement ce problème. Nous ne pouvons que vous préconiser les conseils suivants.

Signes cliniques : vous avez perdu une dent naturelle avec sa racine ou des fragments de dent.

Conseils :

- Récupérer la dent ou les fragments.
- **Ne pas les nettoyer.**
- Conserver la dent ou les fragments dans du sérum physiologique (vendu en dosette). A défaut, dans du lait ou dans la bouche avec la salive.
- Il faut que le sérum, le lait ou la salive recouvre complètement la dent.
- Consulter votre dentiste immédiatement.

- Les chances de réimplantation seront meilleures (voire possibles) si vous voyez un dentiste dans l'heure qui suit.



Il est fortement déconseillé de tenter d'utiliser un instrument du kit DentPass pour ausculter l'intérieur de votre bouche en cas d'infection dentaire, d'ulcération ou de plaies. Si non, votre état dentaire risque de s'aggraver.



7. Infection dentaire :

Le kit DentPass ne vous permet pas de régler provisoirement ce problème. Nous ne pouvons que vous préconiser les conseils suivants.

Signes cliniques : gonflement, douleur à la pression, douleur pulsatile, ganglion enflammé, impression de dent trop haute, difficulté à mastiquer.

Conseils : votre dentiste n'est pas joignable, vous pouvez consulter un médecin généraliste, qui pourra ainsi vous préconiser un traitement antibiotique (si nécessaire), dans l'attente d'un rendez-vous avec votre chirurgien-dentiste habituel au plus tôt.

Il est fortement déconseillé de tenter d'utiliser un instrument du kit **DentPass** pour ausculter l'intérieur de votre bouche en cas d'infection dentaire, d'ulcération ou de plaies. Si non, votre état dentaire risque de s'aggraver.

⚠ Mise en garde spéciale : tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ce kit ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent de moins de 15 ans.

Précaution particulière de conservation : à conserver au sec et à une température inférieure à 30°C et humidité à 40-60%. Se conserve jusqu'à la date de péremption même après ouverture des différents produits.

Composition : une poudre dentaire A (composée d'oxyde de zinc et acétate de zinc), un liquide B (composé d'eugénol, acétate d'isobornyl, méthyl ester de l'acide tridécanoïque, alpha-caryophyllène et isocaryophyllène), une pâte C (composée de sulfate de calcium anhydre), une paire de gants, doigts en latex, compresses de gaze, rouleaux de coton, bloc papier, cuillère doseuse, deux instruments et une notice.

⚠ Précaution particulière d'utilisation : se conformer strictement aux directives indiquées dans la présente notice.

Ne pas ingérer les produits contenus dans les flacons en plastique. En cas d'ingestion par accident, faire vomir la personne. Ne pas mettre au contact des yeux. Ce kit ne remplace pas l'avis d'un professionnel. En cas d'infection ou de doute, consulter votre dentiste. Ne pas utiliser en cas d'infection, d'ulcération ou de gonflement de la zone concernée. Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants. **Il ne faut pas attendre plus de 30 jours** après avoir réalisé ses propres soins d'urgence, sans consulter un dentiste. Si non, l'état de vos dents risque de se dégrader.


Note : au cas où l'un des 3 produits (poudre **A** + liquide **B** + pâte **C**) était totalement utilisé, adressez-vous à votre pharmacien ou sur **notre site www.dentapass.com** pour vous réapprovisionner. Vous pouvez racheter uniquement les recharges de chacun de ces 3 produits de la marque «**DentaPass**» afin d'être sûr de l'efficacité du résultat souhaité.




pharmavoyage Distributeur : KATADYN France
5, rue Gallie - 38100 Grenoble - Tél. 04 76 96 42 46
Service clients : info@katadyn.fr

Mandataire / importateur : SAS DENTOA
148, rue de Paris - 92100 Boulogne-Billancourt
France
Email : info@dentapass.com
SIRET n° : 493 223 572 00048
TVA n° : FR 39 493 223 572 - RCS n° : 493 223 572

 Fabricant : Shenzen Link
Room 1405A, 14/E, Lucky Centre,
165-171 Wanchai Road, Wanchai, Hong Kong
COMPANY No: 1196967

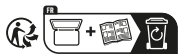

www.dentapass.com

.....
DentaPass[®]
Urgency
.....